

## Produktvejledning

### FORMÅL:

Madrassen er beregnet til forebyggelse og behandling op til stadie 3, EPUAP, Middelrisiko i forhold til udvikling og behandling af tryksår.

Madrassen er opbygget således, at brugeren/patienten bliver trykaflastet mest muligt. Er egnet til patienter i vægtklasse 20 – 140 kg. Kan placeres direkte på sengebunden.


Følgende skal kontrolleres inden brug:

- Passer madrassen til sengen?
- Tjek instrukser på madrassen, så den vender korrekt.

### SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

I henhold til EN 60601-2-52 skal det sikres, at der minimum er 22 cm. fra toppen af madrassen til overkanten af sengehesten, når denne er slået op.

Madrassens vægtbelastning må ikke overskrides. Skum og betræk i madrassen er opbygget af brandhæmmende materiale, men det frarådes, at der ryges eller er åben ild i umiddelbar nærhed. Inden anvendelse af madrassen, skal sengens egen brugervejledning tjekkes.

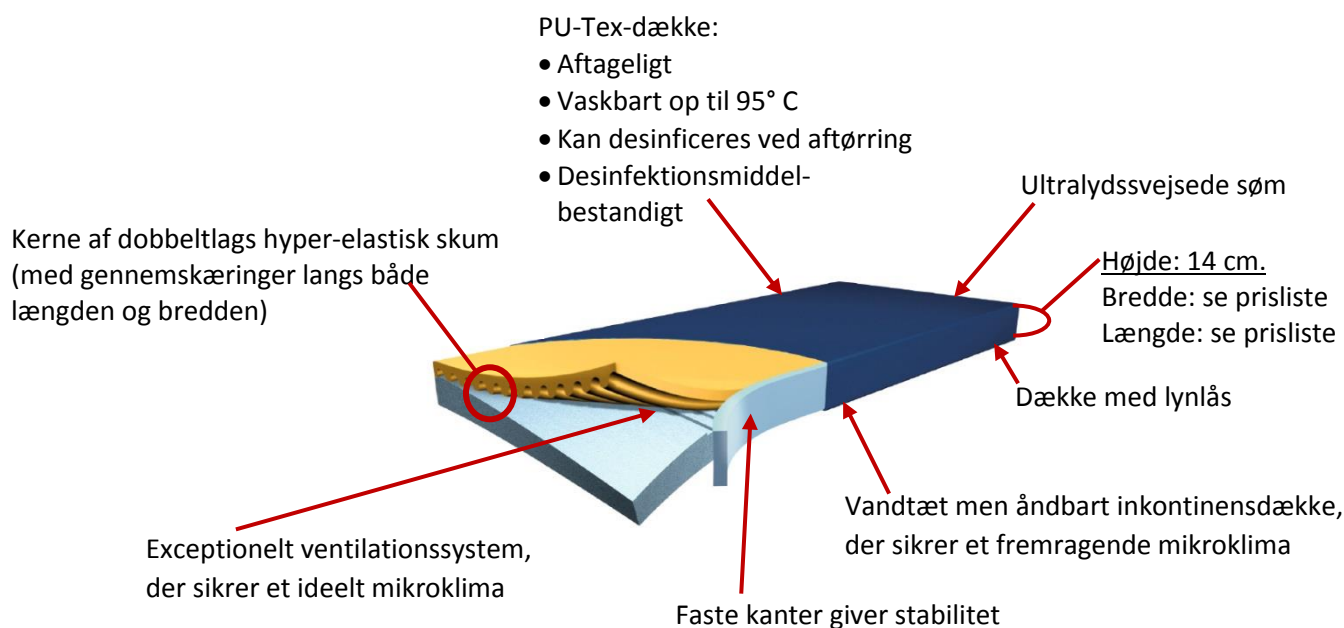


Åndbart, åben-cellet, modstandsdygtigt skum



Autoklaverbar



Virus- og bakteriebestandigt dække

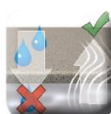

Vandtæt, men vanddamp-permeabel



Tryk <18 mmHg



Bielastisk dække til minimering af forskydningskraft



CE-mærkning



Vedligeholdesfri



Brandhæmmende DIN 597 (I+II) CRIB 5



Patientvægt 20-140 kg

## Brugsvejledning

### **BETRÆK:**

Madrassen har et inkontinensbetræk, der sikrer, at væske som f.eks. blod og urin ikke kan trænge igennem betrækket og ned til skummet. Betrækket er fremstillet i polyuretan, er allergivenligt, virus- og bakteriesikkert, åndbart, PVC-frit og brandhæmmende efter DIN EN 597 I + II // CRIB 5.

### **Vigtigt**

- tjek betrækket en gang om måneden for skader. Er der beskadigelser, skal betrækket repareres eller udskiftes, før madrassen igen må anvendes.

### **RENGØRING:**

Betrækket er aftageligt, kan vaskes ved op til 95°C og kan tørretumbles ved svageste varme. Betrækket rengøres dagligt med en opvredet fugtig klud tilsat almindelige rengøringsmidler eller med desinficeringsmiddel. Autoklaverbart betræk op til 105°C i henhold til RKI\*.

### **Vigtigt**

- betrækket skal være helt tørt, før det trækkes på skummet  
- skal madrassen benyttes af anden bruger/patient, bør betrækket vaskes/desinficeres.

### **OPBEVARING:**

Madrassen skal opbevares ved normal indendørs temperatur (+2°C op til +40°C) og ved normal luftfugtighed. Madrassen opbevares optimalt i udrullet tilstand.

Madrassen har en forventet levetid på 5 år, såfremt almindelige vedligeholdelses- og plejeanvisninger er overholdt.

**GARANTI:** 3 år\*\* (udvidet garanti gælder for skumkernen).

### **BORTSKAFFELSE:**

Både madras og betræk kan bortskaffes ved stort brændbart affald på genbrugspladser. Biokompatibilitet DIN EN ISO 10993-5 ; DIN EN ISO 10993-1

**PRODUKTIONS LAND:** Tyskland

|             |             |
|-------------|-------------|
| Varenummer: | HMI-nummer: |
| hpfoampc    | 103306      |

\* I Robert-Koch-Institutet (RKI) er en del af det føderale sundhedsministerium i Tyskland. Det er ansvarlig for sygdomsforebyggelse og kontrol

\*\* Garantien omfatter madraskernens funktionelle egenskaber.